

Manual de Uso

PORE-VAC es un sistema desechable de recolección de fluidos por vacío, que elimina el tradicional uso de bolsas desechables, logrando que su reemplazo y desecho, sea una tarea sencilla.

El sistema PORE-VAC se compone únicamente de tapa y contenedor rígido completamente desechables. Con tan solo un "click" la tapa queda perfectamente sellada al contenedor, siendo prácticamente imposible removerla y garantizando seguridad en su manipulación y traslado.

- 1) Verificar que el flujo este cerrado



- 2) Insertar la tapa con el contenedor hasta escuchar un "click", una vez colocada la tapa, ya no se podrá retirar



- 3) Insertar el contenedor con tapa en el aro sujetador, verificando que el puerto de vacío tenga el codo.




- 4) Conectar la manguera de vacío en el puerto de vacío.



- 5) Introducir gelante y/o germicida a través el puerto de accesorios. Cerrar firmemente el tapón.



- 6) Conectar al codo del paciente, el tubo con la cánula de Yankahuer

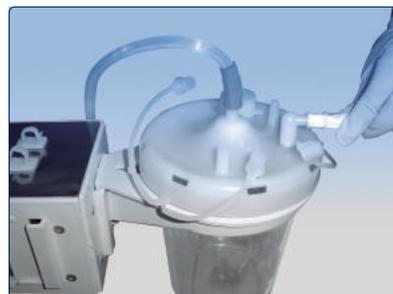

- 7) Abrir el vacío y revisar que no existan fugas.